

ODBĚR BUKÁLNÍHO STĚRU INSTRUKCE



Před odběrem přibližně hodinu nic **nejezte**, **nepijte** (mimo vody), **nežvýkejte** ani neprovádějte ústní hygienu stejně tak kojenec nesmí být nejméně půl hodiny před odběrem kojení.



Umyjte si důkladně ruce mýdlem, případně také dezinfekcí.



Zkumavku **opatrně otevřete otočením víčka**. Poté vytáhněte část obsahující tyčinku s vatovým tampónkem z obalu. Tyčinku držte pouze za koncovou část – víčko.



1 min

Opakovanými pohyby dolů a nahoru (asi 10-krát) **stírejte povrch vnitřních stran z obou lící** (v ústní dutině), přičemž kručte tyčinkou tak, **aby se pokryl celý její povrch stěrem**. Pokud se Vám tvoří v ústech sliny polkněte (setřít sliny tampónkem není žádoucí). Odběrovou sadu uzavřete.



Na zkumavku napište své jméno nesmývatelným fixem. Vzorek vložte do uzavíratelného sáčku a následně do přiložené zpětné obálky spolu s pečlivě vyplněnými dokumenty. Zásilku zašlete v nejbližším možném termínu zpět na naši adresu GHC Genetics. **Poštovné je na naše náklady.**

V případě, že budou Vaše vzorky doručeny bez potřebné dokumentace, nemohou být zpracovány. Před odesláním uchovávejte vzorky v pokojové teplotě. V žádném případě je nekládejte do lednice.